


## Handleiding Sandapter Rolstoel Achterwielset

### Inhoud:

- Twee 49 cm. Wheeleez ballonbanden
- Twee assen (#316 RVS) met verloop van 20 mm. naar 12,0 of 12,7 mm. (afhankelijk van type rolstoel)
- Twee borgveren (#316 RVS)
- Vier stelringen (kunststof met #316 RVS inbusboutjes)
- Twee groene kunststof afstandshouders (ca. 10 cm. lang)
- Twee rode kunststof doppen

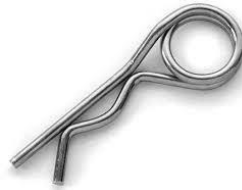

*Borgveer*



*Stelring*



*Accessoires uitgestald op rolstoelzitting*



*Ballonband*

### **Lees voor gebruik onderstaande aandachtspunten m.b.t. veiligheid goed door!**




De Sandapter Rolstoel Achterwielset is opgebouwd uit zeer hoogwaardige materialen en uitgebreid getest in de praktijk. Desondanks willen wij benadrukken dat uw rolstoel van origine niet ontwikkeld is om met ballonbanden uitgerust te worden. Gebruik van de Sandapter Rolstoel Achterwielset geschiedt derhalve op eigen risico. Houd onderstaande veiligheidspunten goed in de gaten!

- Doordat de ballonbanden kleiner zijn dan de meeste reguliere rolstoelwielen kan het zijn dat met de Sandapter Rolstoel Achterwielset uw remmen niet werken. Op het (vlakke) strand geeft dit geen problemen, maar op steile hellingen zoals duinen, overgangen e.d. kan dit leiden tot gevaarlijke situaties. Dit dient dan ook vermeden te worden, bevestig de Sandapter Rolstoel Achterwielset pas aan de voet van het strand!
- Doordat de ballonbanden kleiner zijn dan de meeste reguliere rolstoelwielen komt uw rolstoel met de Sandapter Rolstoel Achterwielset vaak licht achterover te staan. Hierdoor wijzigt het kantelpunt. Voorkom achterover kantelen en houd tijdens het rijden altijd uw begeleider achter uw rolstoel!
- Doordat de ballonbanden iets verder uit elkaar staan dan uw reguliere rolstoelwielen wordt uw frame iets anders belast. Dit is normaal gesproken geen probleem. Twijfelt u echter over de sterkte van uw rolstoelframe dan adviseren wij uw rolstoel-leverancier te raadplegen alvorens gebruik van de Sandapter Rolstoel Achterwielset te maken.
- Doordat de Sandapter Rolstoel Achterwielset universeel bruikbaar is dient u de (groene) afstandhouders zelf op de juiste lengte te zagen. Dit is zeer eenvoudig en kan met bijv. een ijzerzaagje. Voorkom echter ten aller tijden rijden zonder afstandhouder, dit kan ertoe leiden dat de as met wiel uit de rolstoel schiet!

### **Montagebenodigheden**

- IJzerzaagje of ander type zaag, om de afstandhouder op de juiste lengte te zagen (zie montage-instructie)
- Inbussleutel nr. 6 om de stelringen vast te draaien (zie montage-instructie)

**Montage-instructie:**

<p>1 Verwijder de originele wielen van de rolstoel.</p>	 A photograph showing a dark-colored wheelchair with a purple seat, positioned on a rocky, sandy beach. The ocean is visible in the background under an overcast sky.
<p>2 Steek de as door de as-opening van de rolstoel.</p>	 A close-up photograph of the wheelchair's axle assembly. A silver metal axle is being inserted into a black plastic component of the frame. The background shows the rocky ground.
<p>3 Borg de as met de borgveer.</p>	 A close-up photograph showing the axle assembly secured with a metal spring. The spring is attached to a black plastic component of the wheelchair frame. The background is the rocky ground.

- 4 Meet de juiste lengte van de afstandhouder op en zaag deze op lengte.

*De afstandhouder dient op zodanige lengte gezaagd te worden dat de as niet meer terug kan schuiven door de as-opening van de rolstoel, en de as dus op zijn plaats blijft. Hiertoe bepaalt u de afstand van de bevestigde borgveer tot de as-opening van de rolstoel (zie afbeeldingen) en zaagt u de afstandhouder op deze lengte. Een eenvoudig ijzerzaagje volstaat hiertoe. Het uiteindelijke resultaat ziet u in de volgende stap van deze handleiding.*

*Tip: Indien u de set voor meerdere rolstoelen wilt gebruiken, kunt u eenvoudig afstandhouders bijbestellen en per rolstoel op maat zagen!*



- 5 Plaats de afstandhouder.

**Let op:** Hiertoe dient de borgveer weer verwijderd te worden. Plaats de borgveer na plaatsing van de afstandhouder wel terug, rijden zonder borgveer is gevaarlijk en dient vermeden te worden!



- 6 Plaats twee stelringen op het dikke gedeelte van de as, met daartussen de Wheeleez balloband. Stel de band op de juiste afstand van de zitting van de rolstoel, en zet de band vast op de as door de stelringen strak te draaien.

*De band dient zodanig geplaatst te zijn dat deze de rolstoel (frame en zitting) niet raakt. Houd er hierbij rekening mee dat de lage druk ballonband iets breder wordt wanneer de gebruiker in de rolstoel gaat zitten!*

*Tip: Indien u de set voor meerdere rolstoelen wilt gebruiken, is het handig het inbussleuteltje mee te nemen, zodat u de band eenvoudig voor elke rolstoel op de juiste plek op de as vast kunt zetten.*



- 7 Plaats de dop aan het uiteinde van de as.

*Hiermee is het relatief scherpe uiteinde van de as beter afgeschermd, ter voorkoming van verwondingen of schade bij stoten of botsen*



8 Herhaal deze stappen voor de andere zijde van de rolstoel.

*Uw rolstoel is nu gereed voor gebruik op het strand. Houd de veiligheidsaspecten uit deze handleiding altijd in de gaten!*



### **Tot slot**

Voor Sandapter ombouwsets worden uitsluitend zeer hoogwaardige materialen gebuikt, om zo maximale levensduur onder zware omstandigheden als strand te garanderen. Indien desondanks een onderdeel kapot zou gaan zijn alle componenten los na te bestellen. Informeer hiervoor bij uw dealer!